

Nitto

Innovation for Customers

フィルムドレッシング

優肌 **パーミロール**TM シリーズ

PERME-ROLLTM SERIES

皮膚の角質を
ほとんどはがしません。
“むれにくく、かぶれにくい”

株式会社ニトムズ

角質剥離が少なく、水蒸気透過性が高い、フィルムドレッシングです。

特長

1.角質剥離の少ないゲル粘着剤を使用しています

皮膚の角質剥離が少なく、かぶれ・かゆみを抑えます。

2.水蒸気透過性・粘着性にすぐれています

不感蒸泄を妨げないので、むれにくく剥がれにくくなっています。

3.防水性があります

貼付したまま、入浴・シャワーができます。外部からの汚染を防止します。

4.柔軟性・粘着性にすぐれています

薄くしなやかなフィルムなので、屈曲部や凹凸部にもよくなじみ、ずれやはがれが少なくなっています。

5.操作が簡単で、しかも経済的です


操作性にすぐれていますので、スムーズに処理できます。必要に応じた長さに切って使うことができるので無駄がありません。

カーフィルムに波状スリットを入れ、サイドに剥離紙を残すことで、手袋をしたままで貼付が可能になりました。
※14R05～14R15を除く。

使用例


- ドレッシング類で被覆した部位の防水
- ストーマ・CAPD療法等の装具装着部位の防水
- 各種チューブ・ドレーン等の固定

角質保護システム

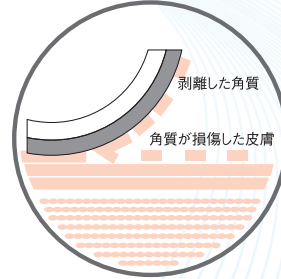

●自社従来品

角質が損傷した皮膚は外界から刺激を受けやすくかぶれの原因にもなります。

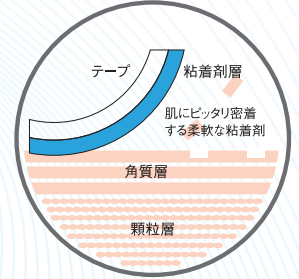


●優肌パーミロール™

角質がほとんどはがれません。

使用上の注意


- 傷口には直接貼付しないでください。
- シャワー・入浴時などには、周囲が皮膚に密着していることを確認し、不完全な場合は新しいものと交換してください。
- 貼付部位の皮膚は清潔で乾いた状態にしてください。また、体毛の多い部位では、必要に応じて剃毛してください。
- フィルムを引っ張って伸ばした状態で貼付しないでください。
- 使用中、皮膚障害その他の異常が認められた時は、直ちに使用を中止してください。
- 再使用はしないでください。
- はがすときは、粘着フィルム周囲の皮膚を軽く押さえながら、ゆっくりはがしてください。
- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。

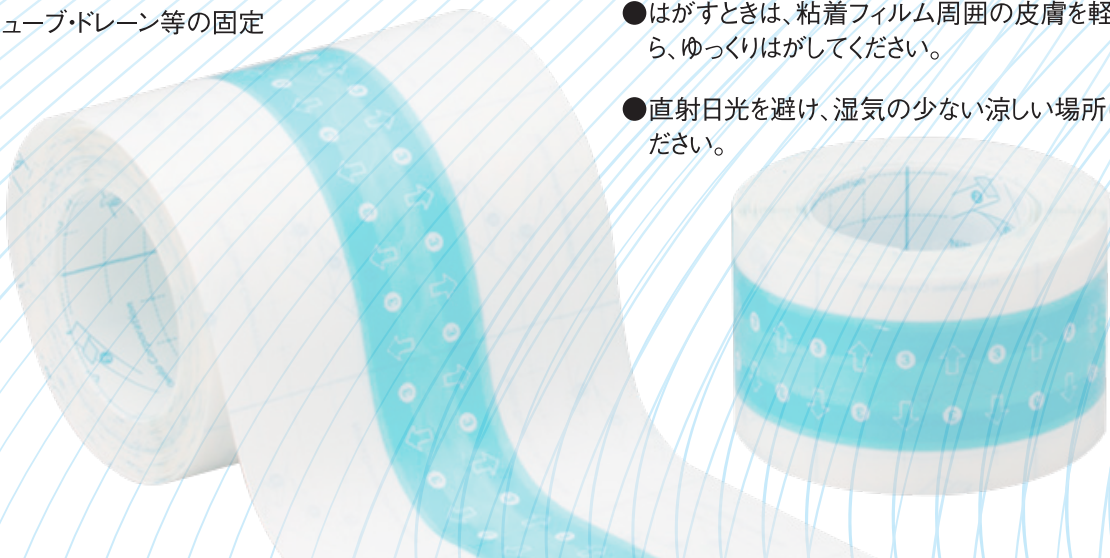


使用手順

優肌 パーミロール™ (ハンディロールタイプ)


※必要な長さにハサミで切り取ってください。

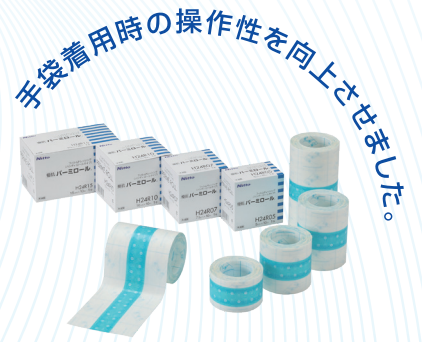


[H24R07、H24R10、H24R15]

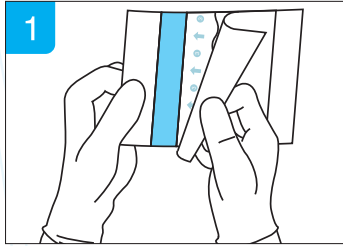

剥離紙の中央部分をはがします。

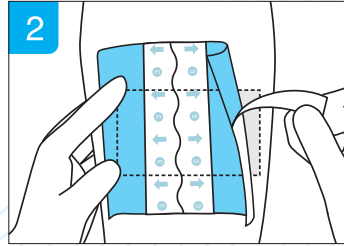


適用部位に貼付し、両サイドの剥離紙をはがします。

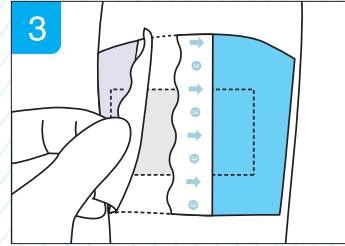


中央の波状スリットから端に向けて、ゆっくりとカバーフィルムをはがします。


[H24R05、H24S05]

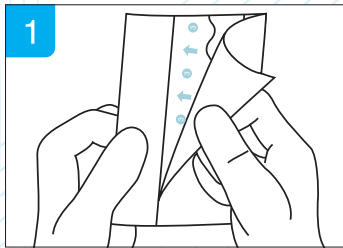

剥離紙の広い面をはがします。

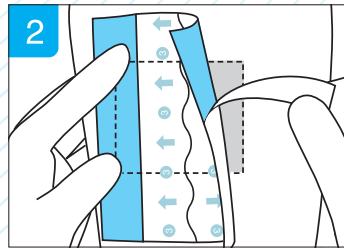


適用部位に貼付し、残りの剥離紙をはがします。

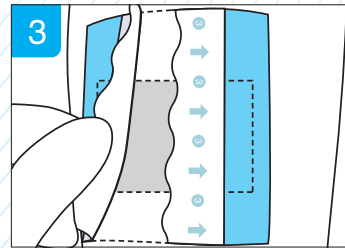


中央の波状スリットから端に向けて、ゆっくりとカバーフィルムをはがします。

お求めやすいショートタイプもございます。


優肌 パーミロール™

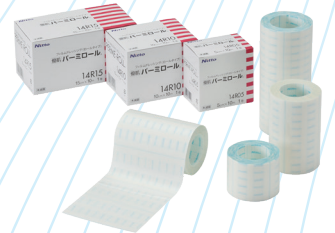


[14R05、14R10、14R15]

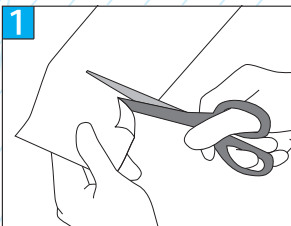


必要な長さにハサミでカットします。

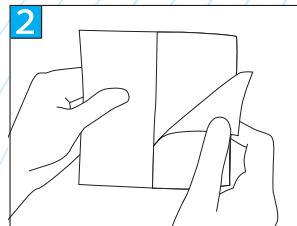

セパレータ中央の切れ目から半分だけをはがします。

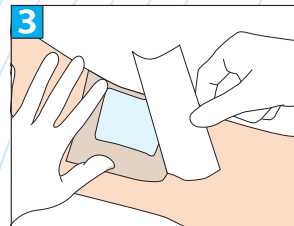

残り半分のセパレータ部分を持ち、貼付部位への位置決めをしたのち、残りのセパレータをはがしつつ貼付します。

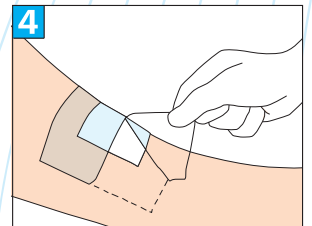

表面のカバーフィルムを中央部から両側へ1枚ずつゆっくりとはがします。

規格・包装

※これらの製品は未滅菌です。



優肌 パーミロール™ (ハンディロールタイプ)


品番	サイズ	入数	JANコード
H24R05	5cm×10m	1巻	4976006712338
H24R07	7.5cm×10m	1巻	4976006712420
H24R10	10cm×10m	1巻	4976006712345
H24R15	15cm×10m	1巻	4976006712352

お求めやすいショートタイプはこちら。



優肌 パーミロール™ HS (ハンディロールタイプ)

品番	サイズ	入数		JANコード
		化粧箱	中箱	
H24S05	5cm×2m	1巻	12化粧箱	4976006712956
H24S10	10cm×1m	1巻	12化粧箱	4976006712963

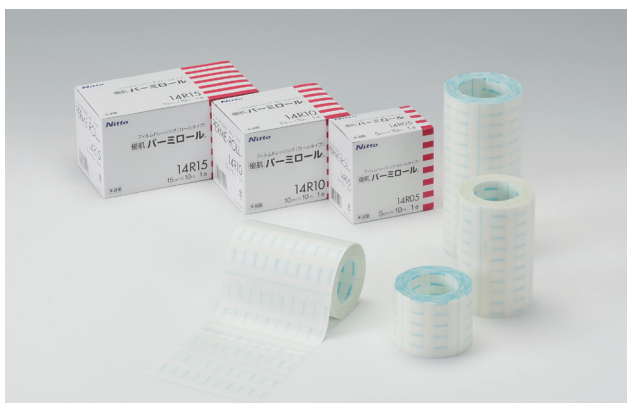

優肌 パーミロール™

品番	サイズ	入数	JANコード
14R05	5cm×10m	1巻	4976006711997
14R10	10cm×10m	1巻	4976006712000
14R15	15cm×10m	1巻	4976006712017

●パーミロール、PERME-ROLLは日東電工(株)の登録商標です。

◆このカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせは

- 製品についてのお問い合わせは
TEL 0570-007-006 FAX 0120-210-679
このカタログの内容は 2025 年 3 月現在のものです。
- 使用上のご注意
詳細については電子添文をご参照ください。
- ◆このカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

Nitto 株式会社ニトムズ

本社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー7階
 東京事業所 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー7階
 大阪営業所 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3-3-13 ニッセイ淀屋橋イースト15階
 仙台営業所 〒980-6014 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 SS30 14階
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1 日本生命博多駅前ビル4階
 豊橋事業所 〒441-3104 愛知県豊橋市雲谷町字ハシヅメ11-6
 松山事業所 〒799-2425 愛媛県松山市中西外1057-1

●ニトムズ医療材製品サービスサイト <https://medical.nitoms.com>
 *ニトムズは、日東電工株式会社(Nitto)のグループ企業です。



豊橋事業所
松山事業所
NJ25・03 (NJ)