

●保険請求:伸縮性包帯

健康保険においては、特定保険医療材料として伸縮性包帯の算定は認められませんが、労災保険については、伸縮性包帯を頭部・頸部・軀幹のほか四肢に使用した場合に算定が認められています。

The image shows three boxes of Nitto KINSELF 181 OS adhesive tape. The boxes are white with blue and yellow diagonal stripes. The text on the boxes includes 'Nitto', 'KINSELF 181 OS', and '瞬間接着剤' (Instant Adhesive). Two rolls of the tape are shown in the foreground, one partially unrolled, showing the white adhesive surface.

The image shows two boxes of Nitto Kinoself 199-05 tape. The boxes are white with orange and yellow stripes. The text on the boxes includes "Nitto", "キノセルフ 199-05", and "両面接着テープ". To the right of the boxes are two rolls of the tape, which is white and has a yellow core.

お問い合わせは

●製品についてのお問い合わせは
TEL 0570-007-006 FAX 0120-210-679
このカタログの内容は2024年6月現在のもです。
◆このこのカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

本 社	〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー7階
東京事業所	〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー7階
大阪営業所	〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3-13-3 ニッセイ淀屋橋イースト15階
仙台営業所	〒980-6014 宮城県仙台市青葉区中央4-3-6 1SS30 14階
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区多摩駅3-2-1 日本生命博多駅前ビル4階
松山事業所	〒441-3104 愛知県豊橋市雲台町字ハズメ11-6
岐阜事業所	〒799-2425 愛媛県松山市中西外1057-1

●ニトムズ医療材製品サービスサイト <https://medical.nitoms.com>
*ニトムズは、日東電工株式会社 (Nitto) のグループ企業です。



伸縮布自着包帶


キノセルフ™
KINOSELF

株式会社ニトムズ

マイクロ・ラテックス処理による自着性が 包帯のイメージを一新しました。

マイクロ・ラテックス処理とは、合成ラテックスを特殊な方法でコーティングするものです。写真中繊維の間に見えるピンクの粒子がラテックス微粒子で、この微粒子同士が接着することにより、皮膚や衣類には付かない「自着性」が生まれます。キノセルフ™ は、伸縮布にマイクロ・ラテックス処理を施して自着性をもたせた、新しいタイプの包帯です。

(マイクロ・ラテックス処理繊維は、ドイツ、日本両国の特許を取得しています。)

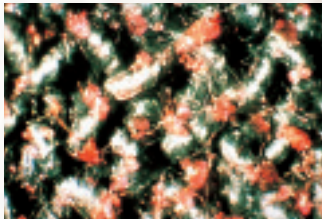

■ 特長

1. 皮膚・頭髮や衣類には接着しません。

はがすときにも体毛を引っ張ることがなく、痛くありません。
皮膚を痛めないで、かぶれにくくなっています。

2. どんな部位にも、しっかりと巻くことができます。

複雑な形状の部位や丸い部位にも簡単に巻け、動いても、ずれたりはがれたりしません。

3. 圧迫調節が自在にできます。

患部に必要な圧迫度合いを自在に調節でき、また、巻き直しも簡単にできます。

4. 通気性・吸湿性に優れています。

ラテックス粒子が付着しているのは表面積全体の1~2%なので、
基布本来の風合いや通気性・吸湿性は損なわれません。

5. 経済的です。

一巻ごとにしっかりと接着されるので、従来の包帯の1/2~1/3の量で済みます。

6. オートクレーブ滅菌が可能です。

■ 従来の包帯との比較(手指疾患の固定)



従来の伸縮包帯



キノセルフ™

こんなに違います！

■ 臨床使用例

104

横方向にも強い安定性をもち、長期使用に耐える100%綿素材の肌色高弾力包帯
[圧迫固定用]



(キノセルフ™ 104-10 使用)

181

適度な伸縮性をもつ白色クレープ状ガーゼ包帯
[ソフトな固定用]



(キノセルフ™ 101-05 使用)

199

クレープ状ハニカム構造の特殊織り白色弾力包帯
[圧迫固定用]
(手で裂くことができるので、救急の場合にも便利です。)



(キノセルフ™ 199-08 使用)

この他にも、手術後の創部安定と保護、下肢静脈瘤治療後の圧迫固定、注射針やカテーテルの固定、捻挫・脱臼・骨折箇所固定など、さまざまな部位・用途に使用できます。(詳しくは裏面をご覧ください。)