

吸収フォームドレッシング

OPTIFOAM GENTLE EX

オプティフォーム ジェントル EX

品番	サイズ (cm)	パッドサイズ (cm)	入数/ 化粧箱	価格	価格 (税抜)	入数/ 外箱
MSCEX33EP	7.6×7.6	4.5×4.5	10枚	¥2,090	¥2,299	10箱
MSCEX44EP	10.1×10.1	6.5×6.5	10枚	¥2,640	¥2,904	10箱
MSCEX66EP	15.2×15.2	11×11	10枚	¥5,500	¥6,050	10箱
MSCEX77EP	17.8×17.8	13×11.8	5枚	¥3,960	¥4,356	8箱

使用方法



パッケージから本製品を取り出し、剥離紙を片方取り除く。



本製品を皮膚に優しく固定する。

●貼付前

創部と周囲を適切に洗浄し、水分をしっかりとふき取ってから貼付してください。

●サイズ選択

傷の大きさより2cm程、大きなサイズを選択してください。

●交換の目安

週に1～2回を目安とし、滲出液がテープの縁に達する前に交換してください。
連続貼付は最長7日間までとしてください。但し便汚染等 zu 注意し、汚染を確認したらすみやかにドレッシング材を交換し、スキンケアを行ってください。



吸収フォームドレッシング

OPTIFOAM GENTLE LITE NB

オプティフォーム ジェントル Lite NB

品番	サイズ (cm)	入数/化粧箱	価格	価格 (税抜)	入数/ 外箱
MSC2944NB	10×10	10枚	¥5,060	¥5,566	10箱
MSC2966NB	15×15	10枚	¥9,460	¥10,406	10箱

使用方法




パッケージから本製品を取り出し、剥離紙を片方取り除く。




別途テープやフィルムドレッシングで固定が必要。

〈サージカルテープでの固定例〉

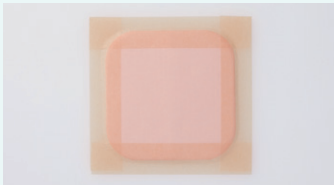

四辺をしっかり止める

〈フィルムドレッシングでの固定例〉

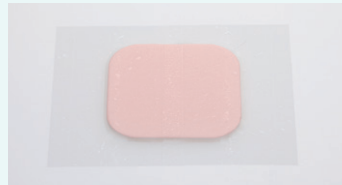

余裕をもって全体を覆う



【使用目的又は効果】本品は、創部の被覆及び保護に用いる。

【禁忌・禁止】 1. 再使用禁止 2. 再滅菌禁止

使用上のご注意

●詳細については電子添文をご参照ください。

製品詳細情報

(ニトムズホームページ)



症例レポート



電子添文



一般医療機器 救急絆創膏
(手術用被覆・保護材／熱傷被覆・保護材)
届出番号 13B1X00062AWC001
製造販売業者：メドライン・ジャパン合同会社

カタログご利用の皆様へ

- 製品についてのお問い合わせは TEL 0570-007-006 FAX 0120-210-679
- 使用上のご注意、詳細については電子添文をご参照ください。
- このカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。(2024年8月現在)

Nitto 株式会社ニトムズ

ニトムズ医療材製品サービスサイト

<https://medical.nitoms.com>



*ニトムズは、日東電工株式会社(Nitto)のグループ企業です。

EF 24・08 (PAC)

MEDLINE

吸収フォームドレッシング

OPTIFOAM GENTLE EX

オプティフォーム ジェントル EX

吸収フォームドレッシング

OPTIFOAM GENTLE LITE NB

オプティフォーム ジェントル Lite NB

株式会社ニトムズ

創部や皮膚をまもる優しい貼り心地。
様々な部位にフィットする
フォームドレッシングシリーズ。

様々な創部の保護に

吸収性

肌に優しい


かんたん操作

吸収フォームドレッシング

OPTIFOAM GENTLE EX

オプティフォーム ジェントル EX

オプティフォームジェントルEXは独自の5層構造により吸収性・適度なクッション性・
滑り性・通気性を備えた肌に優しいウレタンフォームドレッシングです。
患者様の療養生活・医療従事者様の利便性の向上を実現しました。

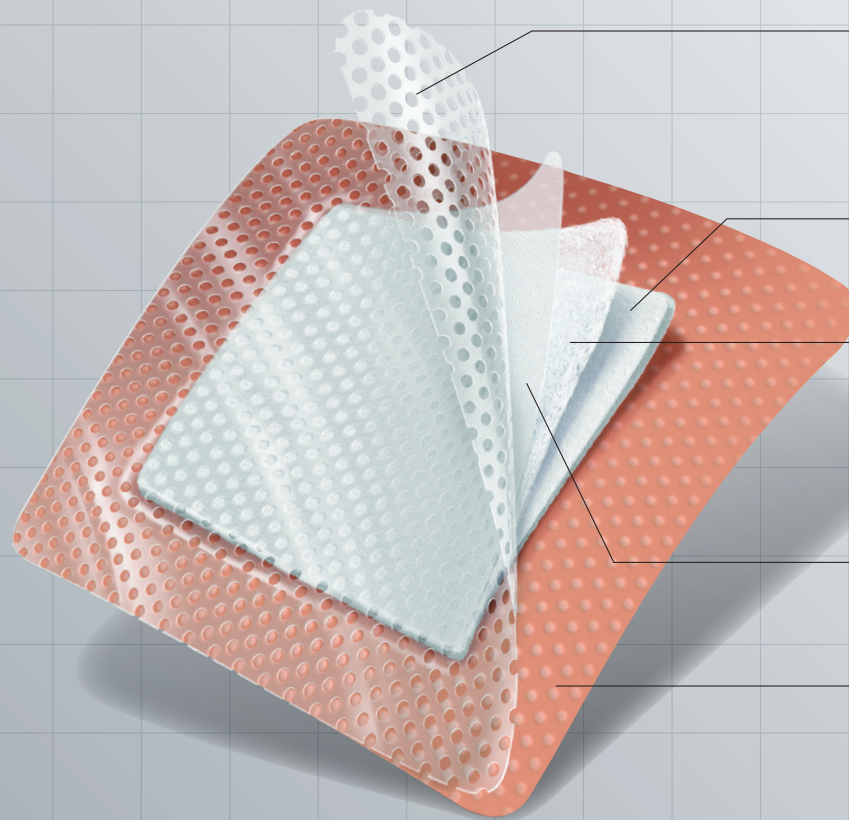

シリコン層

シリコン粘着剤が皮膚に密着することで、ズレにくく、
様々な部位にフィットします。またドレッシング交換時には、
剥離の痛み、組織損傷から創部・周囲皮膚を優しく守ります。

フォーム層

フォーム層が創面の滲出液を吸収します。

吸収層

吸収層が滲出液を
逃がさず吸収します。




吸収動画

ネット層

滲出液を吸収層にスピーディーに移行させます。

通気性【防水】フィルム

使用環境を考慮して水
蒸気透過性と滑り性の
あるフィルムを採用し
ています。

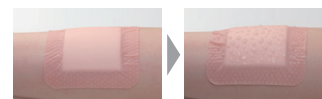

防水性がありシャワー浴可能です。

吸収フォームドレッシング

OPTIFOAM GENTLE LITE NB

オプティフォーム ジェントル Lite NB

オプティフォームジェントル Lite NBは
やわらかいフォームとシリコン粘着剤のシンプル構造。
自由にカットして使えるので様々な部位に使用できます。



かんたん操作


シリコンの微粘着により仮貼付が容易です。*

カット自在

創の形に合わせて、自由にカットできるので様々な部位に
貼付できます。

適度な厚み


やわらかいクッションで創を優しく守ります。

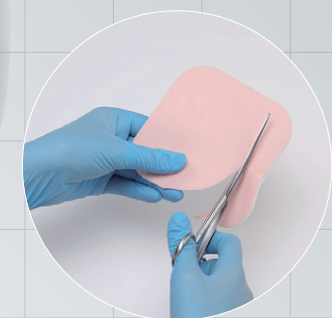

カット可能な
薄型フォーム*

※ 別途テープやフィルムドレッシングで固定が必要となります。

適用症例

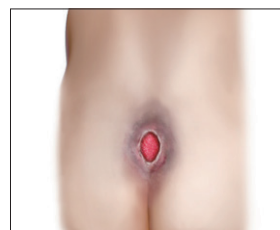


褥瘡



スキン-テア(皮膚裂傷)




擦過傷

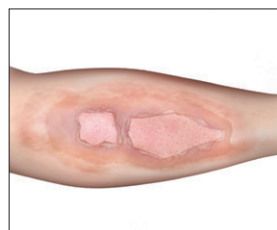

I・II度熱傷

褥瘡の
発生部位例

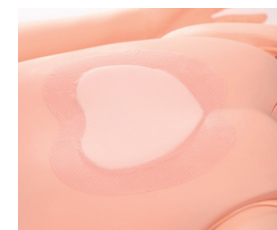

仙骨



踵



肩甲骨

大転子
尾骨 など