

医療用品（4）整形用品  
一般医療機器 カテーテル被覆・保護材  
JMDNコード 70444000


## パーミエイド・ピロー

### 再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

本品はウレタンフィルム及び不織布からなる支持体にアクリル系粘着剤を塗布したフィルムドレッシング材である。  
体に接触する部分の組成：アクリル系粘着剤

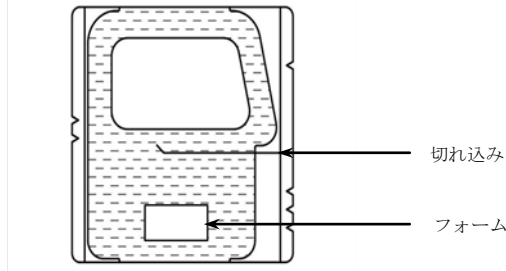

### サイズ・包装

製品番号	サイズ	入数/化粧箱
1206	6cm×7cm	50枚

### 【使用目的又は効果】

注射針又はカテーテル刺入部位に直接貼付して、その固定に用いる。

### 【使用方法等】

(貼付方法)

- 1) 包装を開いて本品を取り出し、剥離紙(1)\*を折り返す。
- 2) 注射針又はカテーテルを持ち、フォームがあるフィルム側をチューブの下に置く。このとき剥離紙(1)\*を折り返したときに注射針又はカテーテル刺入部を被覆できる位置に合わせるとともに、フォームの上にチューブを置く。
- 3) 剥離紙(1)\*の端をつまみ、注射針又はカテーテルの抜去に注意して剥離紙をゆっくりはがす。
- 4) フィルムの上から押さえ、注射針やカテーテルに沿ってよく密着させる。
- 5) 剥離紙(2)\*の端をつまみ、剥離紙をゆっくりはがす。
- 6) 剥離紙(3)\*の端をつまみ、剥離紙をゆっくりはがす。
- 7) もう一度フィルムを上から押さえ、皮膚とよく密着させる。
- 8) 剥離紙に付属する固定テープでフォームの上に置いたチューブを固定する。残りの固定テープは注射針やカテーテル周囲の補強やルート固定に使用することができる。

\* (1) (2) (3)にはV字型の切り欠きが目印として各々1、2、3箇所入っている。

(除去方法)

- 1) 固定テープを端からゆっくりはがす。
- 2) カテーテル等が抜去しないようにカテーテルや周囲の皮膚を軽く押さえながら、本品を端から静かにはがし取る。

### 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意  
本品使用中に皮膚障害その他異常が認められたときは、直ちに使用を中止し、適切な治療を行うこと。
2. その他の注意
  - 1) 本品は開封後、直ちに使用すること。
  - 2) 本品を再滅菌しないこと。
  - 3) 本品を貼付する前に、刺入部位を十分に消毒して、乾いた状態にすること。

- 4) 本品を関節などの可動部に使用しないこと。留置針の抜去や破損の恐れがある。
- 5) 末梢用カテーテルの固定専用であり、IVHカテーテル固定等には使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
室温保存
2. 有効期間  
3年[自己認証(当社データ)による]  
包装の使用期限欄を参照すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：日東電工株式会社  
TEL 03-6632-2013  
販売業者/問合せ先：株式会社ニトムズ  
TEL 0120-210-522