

医療用品（4）整形用品
一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000

パーミパッド。


PERME-PAD®

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品はポリウレタンフィルムの支持体にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープで、中央部には不織布にポリエチレンネットを積層させたパッドが置かれている。粘着テープならびにパッドはセパレータに覆われ、内袋に納められている。

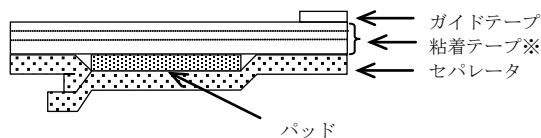

※：支持体保護フィルム+支持体+粘着剤

（体に接触する部分の原材料名）

粘着テープ：ポリプロピレンフィルム、ポリウレタンフィルム、
ポリアクリル酸エステル系粘着剤、グリセリン脂肪酸
エステル

パッド：レーヨン、ポリエステル、ポリエチレン・ポリプロ
ピレンの混紡不織布及びポリエチレンネットの積
層パッド

サイズ・包装

製品番号	サイズ（パッド部サイズ）	入数/化粧箱
1609	6cm×9cm (2.5cm×4cm)	50 枚
1611	6.5cm×11cm (3cm×6cm)	20 枚
1613	10cm×13.5cm (5cm×6.5cm)	20 枚
1617	10cm×17cm (5cm×10cm)	20 枚
1621	10cm×21cm (5cm×14cm)	20 枚
1625	10cm×25cm (5cm×18cm)	20 枚

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

- 1) 包装を開いて取り出したのち、セパレータを剥がし取る。
- 2) 中央部のパッドに手指が触れないように、創傷部にあてる。
- 3) パッド周囲の粘着フィルムをよく押さえ、皮膚に密着させる。
- 4) 支持体保護フィルムを剥がし取る。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
本品使用中に皮膚障害その他の異常が認められたときは、直ちに使用を中止すること。
2. その他の注意
 - 1) 貼付部位の皮膚は清潔で乾いた状態にすること。また、体毛の多い部位では、必要に応じて剃毛すること。
 - 2) フィルム部分を引っ張って伸ばした状態で貼付しないこと。
 - 3) 発汗があった場合やパッド部が滲出液で汚れた場合などには、必要に応じて新しいパーミパッドと交換すること。
 - 4) 剥がすときは周囲の皮膚を軽く押さえながら、ゆっくり剥がすこと。パッド部が剥がれにくい場合には、生理食塩液などで湿らせてからおこなうこと。

- 5) 本品は開封後、直ちに使用すること。
- 6) 本品を再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
室温保存
2. 有効期間
3年[自己認証（当社データ）による]
包装の使用期限欄を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：日東電工株式会社

TEL 03-6632-2013

販売業者/問合せ先：株式会社ニトムズ

TEL 0120-210-522