


Nitto

Innovation for Customers

シリコンテープ付き
吸収フォームドレッシング

アブソキュアTM フォーム

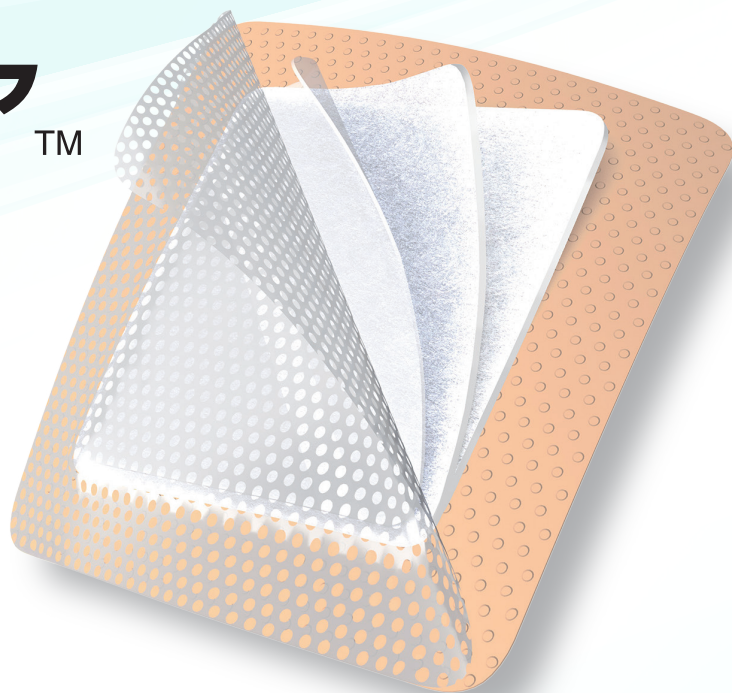

吸収フォームドレッシング

アブソキュアTM フォーム Lite NB

株式会社ニトムズ

シリコンテープ付き吸収フォームドレッシング アブソキュアTM フォーム

品番	製品サイズ (cm)	パッドサイズ (cm)	入数/内箱	価格	価格(税込)	入数/外箱
MM6011	7.5×7.5	5×5	10枚	¥2,400	¥2,640	20箱
MM6012	10×10	6.4×6.4	10枚	¥3,040	¥3,344	20箱
MM6013	15×15	11.5×11.5	10枚	¥6,330	¥6,963	20箱

使用方法



はくり紙の片方をはがし、貼る準備をする。



残りははくり紙をはがして本製品を貼付し、しっかりと固定する。

●貼付前

創部と周囲を適切に洗浄し、水分をしっかりとふき取ってから貼付してください。

●サイズ選択

傷の大きさより2cm程、大きなサイズを選択してください。

●交換の目安

週に1～2回を目安とし、滲出液がテープの縁に達する前に交換してください。

連続貼付は最長7日間までとしてください。但し便汚染等にご注意し、汚染を確認したらすみやかにドレッシング材を交換し、スキンケアを行ってください。



吸収フォームドレッシング アブソキュアTM フォーム Lite NB

品番	製品(パッド)サイズ (cm)	入数/内箱	価格	価格(税込)	入数/外箱
MM6111	10×10	10枚	¥5,820	¥6,402	20箱


使用方法



本製品を取り出し、はくり紙を片方はずす。
※必要に応じて切り込みを入れる。



粘着面を皮膚にあて、残りははくり紙をはがして仮固定をする。さらにサージカルテープなどで二次固定する。

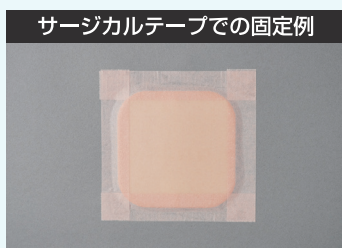

四辺をしっかり止める。



余裕をもって全体を覆う。

【使用目的又は効果】

本品は、熱傷等の損傷のある皮膚及び術後創傷を被覆及び保護し、適用部位の滲出液を吸収する。

【禁忌・禁止】 1. 再使用禁止 2. 再滅菌禁止

販売名：アブソキュアフォーム

一般医療機器：救急絆創膏（手術用被覆・保護材、熱傷被覆・保護材）

届出番号：13B1X10445000002

製造販売業者：ジェンデメディカルジャパン株式会社

販売業者 / 問合せ先：株式会社ニトムズ（TEL 0120-210-522）

カタログご利用の皆様へ

- 製品についてのお問い合わせは TEL 0570-007-006 FAX 0120-210-679
- 使用上のご注意、詳細については電子添文をご参照ください。
- このカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。（2026年7月現在）

※ アブソキュアは、Nittoグループの商標です。

Nitto 株式会社ニトムズ

ニトムズ医療材製品サービスサイト <https://medical.nitoms.com>

*ニトムズは、日東電工株式会社(Nitto)のグループ企業です。

NID 26-07 (EF)

