

医療用品（4）整形用品
一般医療機器 カテーテル被覆・保護材（救急絆創膏）
JMDNコード 70444000（34864000）

パーミエイド™

再使用禁止

【禁忌・禁止】


再使用禁止

2. 有効期間

3年[自己認証（当社データ）による]
包装の使用期限欄を参照すること。

【形状・構造及び原理等】

本品は保護フィルムで覆われた支持体、粘着剤層、剥離紙からなる。支持体はポリウレタンフィルム、粘着剤層はポリアクリル酸エステル系粘着剤、グリセリン脂肪酸エステル及び多官能イソシアネートからなる。

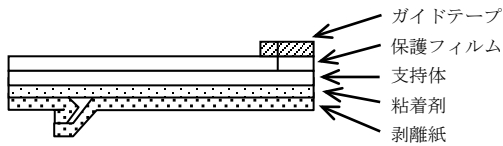

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：日東電工株式会社
販売業者／問合せ先：株式会社ニトムズ
TEL 0120-210-522

サイズ・包装

製品番号	サイズ	入数/化粧箱
1409	6cm×9cm	100枚
1410	8cm×10cm	50枚
1413	10cm×13.5cm	50枚
1425	10cm×25cm	20枚

【使用目的又は効果】

1. カテーテル固定用途
注射針又はカテーテル刺入部位に直接貼付して、その固定に用いる。
2. 救急絆創膏用途
傷の被覆及び保護、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

(貼付方法)

- 1) 包装を開いて取り出したのち、剥離紙をはがす。
- 2) フィルム粘着面に手指が触れないようにして、注射針又はカテーテル刺入部位もしくは創傷部位に貼付する。
- 3) フィルムの上から押さえ、皮膚とよく密着させる。穿刺部へ適用する場合には、先に穿刺部周囲をよく押さえしてから全体を密着させる。
- 4) 保護フィルムをゆっくりはがし取る。

(除去方法)

周囲の皮膚を軽く押さえながら、端から静かにはがし取る。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
本品使用中に皮膚障害その他異常が認められたときは、直ちに使用を中止し、適切な治療を行うこと。
2. その他の注意
 - 1) 本品は開封後、直ちに使用すること。
 - 2) 本品は再滅菌しないこと。
 - 3) 本品を貼付する前に、刺入部位は十分に消毒すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
室温保存