



NEW


非固着性ガーゼ

# ARTEMESH ADVANCE

アルテメッシュ アドバンス

ぴたっと貼れて優しくはがせる、  
しなやかなメッシュが創面を保護

保険適用

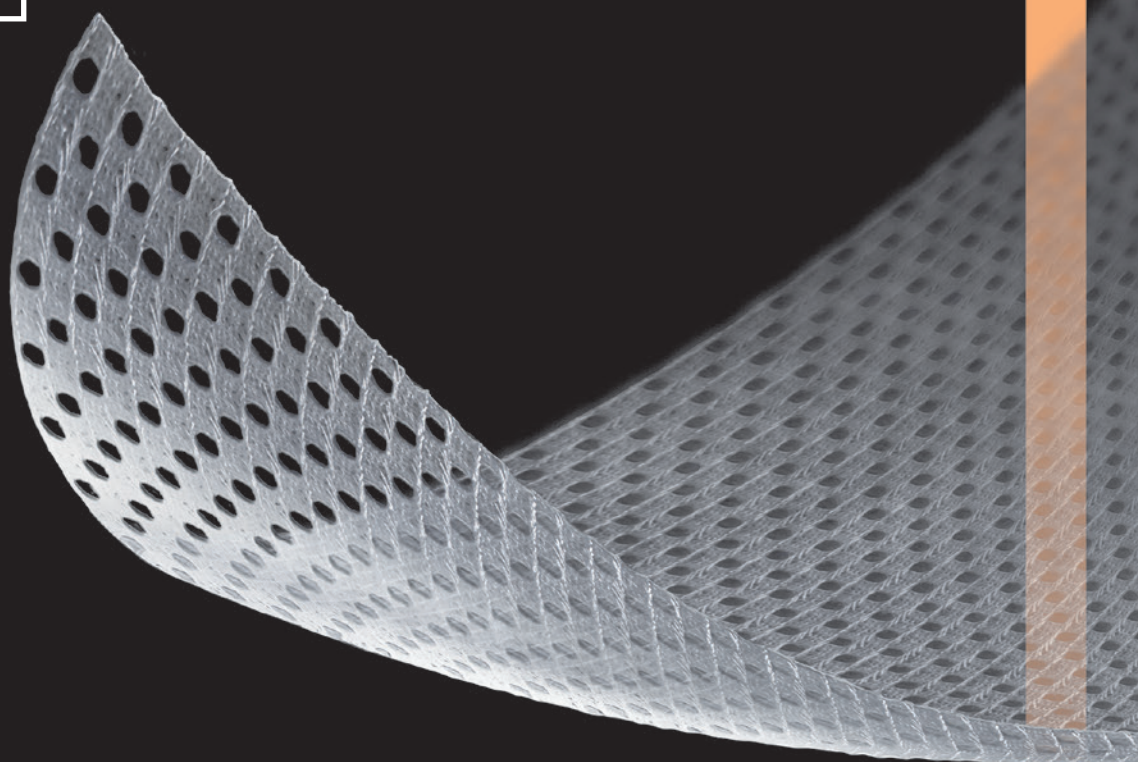

株式会社ニトムズ

# 創部にフィットする非固着性ガーゼ。 滲出液を透過させつつ固着を防ぎ、やさしく創を保護します。

非固着性ガーゼ

NEW

## ARTEMESH ADVANCE


アルテメッシュ アドバンス

■ シリコンゲル層が創部を保護し、固着を防ぎます。

■ しなやかなメッシュは追従性があり、湾曲部にもなじみます。

■ 半透明のメッシュで創の状態を観察いただけます。


■ エンボス加工により取り扱いが容易で操作性が向上します。

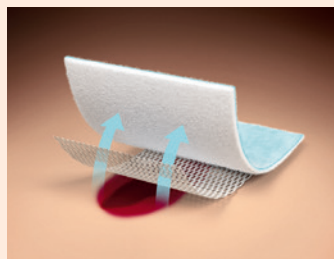

滲出液や血液が二次ドレッシングに移行します。



### 貼付方法

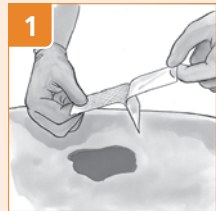

1 傷の周りを清拭し乾かします。本品のセパレータをゲル面に手が触れないように剥がします。



2 創傷表面に本品を貼付し、上部のセパレータを静かに取り外します。



3 その上をフォームドレッシングのように、適切な吸収性のある滅菌済ガーゼ等で覆って下さい(二次ドレッシング)。その後、粘着テープや包帯等の適当な手段で固定します。

品番	サイズ (cm)	入数/化粧箱	価格 (税込)	入数/外箱
MSCJ1722AD	5.1×5.1	10枚	¥1,452	60箱
MSCJ1734AD	7.6×10.2	10枚	¥2,420	60箱
MSCJ1745AD	10.2×12.7	10枚	¥3,520	40箱
MSCJ1747AD	10.2×17.8	10枚	¥4,290	30箱
MSCJ17812AD	20.3×30.5	10枚	¥16,500	30箱

### 【使用目的又は効果】

本品は、創部の保護及び固着防止に用いること。

### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止 2. 再滅菌禁止

### 使用上のご注意

●詳細については添付文書をご参照ください。

管理医療機器 非固着性創傷被覆・保護材  
JMDNコード：11325000  
認証番号：302ADBZX00070000  
EOG 滅菌済  
製造販売業者：メドライン・ジャパン合同会社

## 保険適用

種類：特定保険医療材料  
販売名および保険請求名：アルテメッシュ AD 非固着性ガーゼ  
機能区分：平坦部位用  
保険請求：償還価格による。

## Nitto 株式会社ニトムズ

●ニトムズは、日東電工株式会社(Nitto)のグループ企業です。

本社 〒140-0002 東京都品川区東品川 4-12-4 品川シーサイドパークタワー7階  
東京営業所 〒140-0002 東京都品川区東品川 4-12-4 品川シーサイドパークタワー7階  
大阪営業所 〒541-0042 大阪市中央区今橋 3-3-13 ニッセイ淀屋橋イースト15階  
仙台営業所 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 5-1-23 仙台Kビル  
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-3-6 第三博多倍成ビル  
豊橋事業所 〒441-3104 豊橋市雲谷町字ハシツメ11-6  
松山事業所 〒799-2425 愛媛県松山市中西外 1057-1



●お問い合わせは  
TEL 0570-007-006 FAX 0120-210-679

●このカタログの内容は 2021 年 4 月現在のものです。

●ニトムズのホームページ <https://www.nitoms.com/>

PAC 21・04000 (EF-012)