

「ミゼアセーフ™W」 形状変更のご案内

●製品番号・入数・販売価格・JANコードの変更はございません。


製品名	製品番号	JANコード	切替え開始の目安
ミゼアセーフW	MM0002	4582129724020	2024年4月下旬～5月上旬

【変更内容】

<p>1.形状変更 A&B</p>	<p>2.補強テープの形が直線から波状へ (チューブ取り外し向上の為)</p>
<p>A: スリットを広く B: 線スリット</p>	
<p>3.両面テープの形状変更 (貼付時の操作向上の為)</p>	<p>4.はくり紙の背割り位置変更 (貼り付けやすさ向上の為)</p>
	<p>裏側土台はくり紙</p>

※両面テープは現行品と同様取り外ししやすいように、また必要以上に粘着しないよう中央より左側によせています。



※両面テープにチューブがかかるよう、チューブを置いてください。

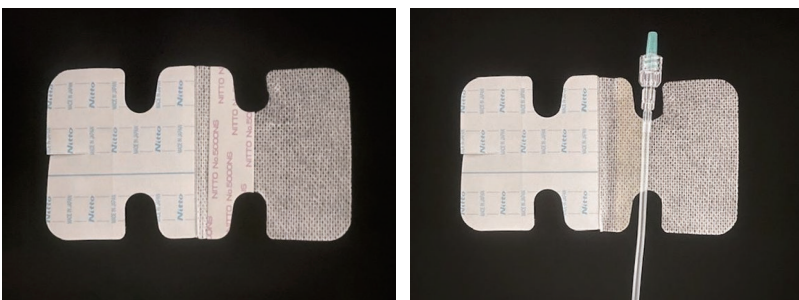

【お問合せ先】


弊社営業担当者 または カスタマーセンター
TEL : 0570-007-006
受付時間 : 平日9:00～17:30

ミゼアセーフ™W 貼り方

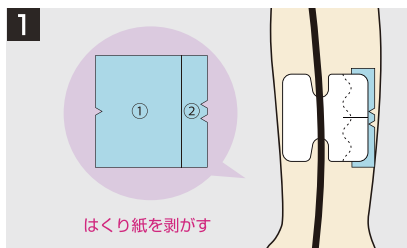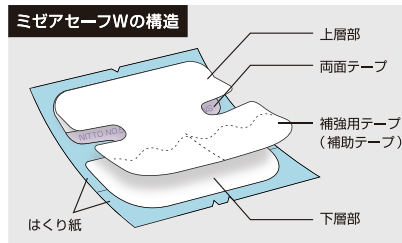


はくり紙を剥がす


はくり紙①をはがし、チューブの下にもぐり込ませて、チューブがスリット部の中央にくるように皮膚に貼ります。

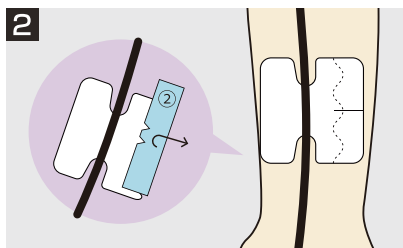

はくり紙②をはがし、残りの部分も貼ります。

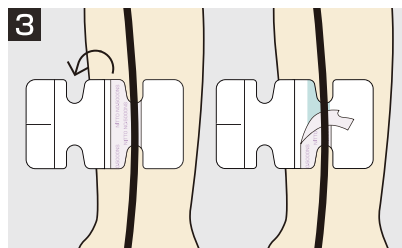


上層部を開いた後、両面テープのはくり紙 (NITTO No.5000NS) をはがします。

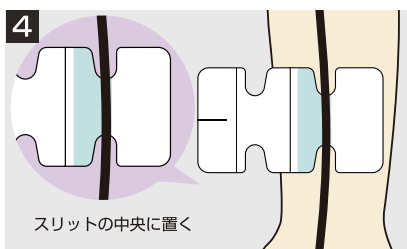


スリットの中央に置く


スリット部の中央にチューブを置きます。
※両面テープの中央ではありません。

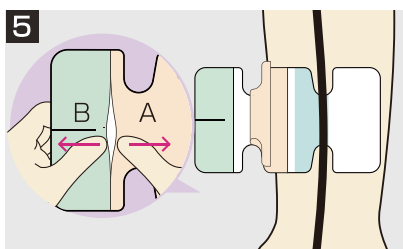

上層部のはくり紙を矢印方向にひっぱるとはくり紙が浮きますので、はくり紙Aをはがしてください。

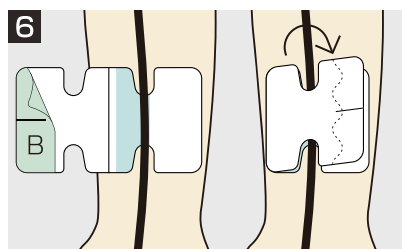


はくり紙Bもはがし、チューブを覆うように貼り、しっかり密着させます。

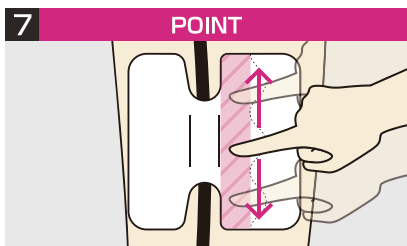


POINT


斜線の部分は特にしっかり密着するように押さえてください。

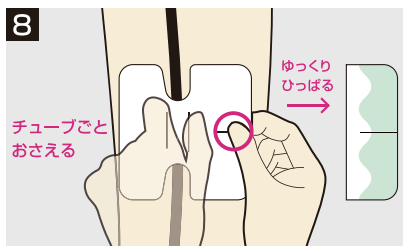

きれいに貼るため中央の部分を指でしっかりおさえながら、○の部分を持ってゆっくと水平にひっぱります。

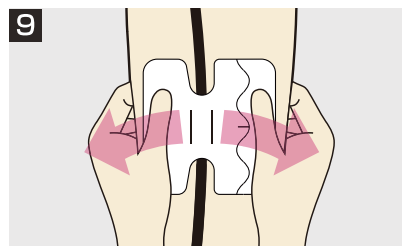


テープ全体をなじませて密着固定させます。

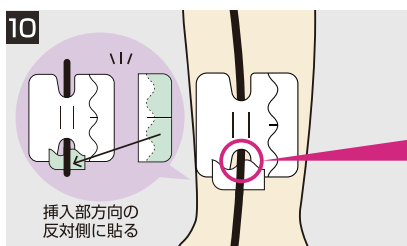


挿入部方向の反対側に貼る

はがれにくくするために、補強用テープをチューブの下にもぐり込ませて、皮膚に直接貼る面積が多くなるように貼ってください。

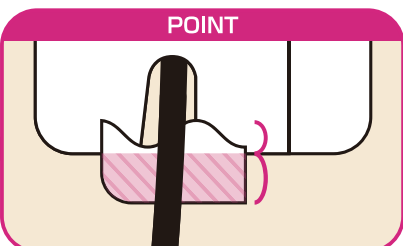


POINT

※皮膚に直接貼る面積が多くなるように補強用テープを貼ってください。

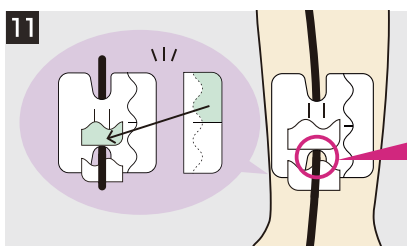


チューブが出てくる付け根のギリギリにチューブにはかからないよう貼ってください。

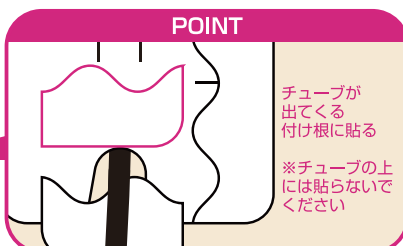

POINT

チューブが出てくる付け根に貼る
※チューブの上には貼らないでください

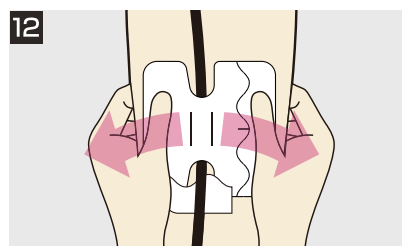

テープ全体をなじませて密着固定させてください。